



# Stručný návod na obsluhu

- ① **Tlačidlo otáčok:** Štart motora / zvýšenie otáčok.
- ② **Tlačidlo chladiaceho prostriedku:** Pre tlačidlo chladiaceho prostriedku je možné nastaviť 2 prevádzkové režimy. V závislosti od nastaveného prevádzkového režimu plní tlačidlo chladiaceho média nasledovné funkcie:  
 Krátke stlačenie - zapnutie/vypnutie čerpaného množstva chladiaceho prostriedku alebo  
 krátke stlačenie - nastavenie množstva čerpaného chladiaceho prostriedku od 0 do 110 ml/s (4 stupne).  
 Dlhé stlačenie - aktivácia funkcie manuálneho preplachovania
- ③ **Programovacie tlačidlo:** Krátke stlačenie - prejsť na ďalší krok programu.  
 Dlhé stlačenie - prejsť na predchádzajúci krok programu.
- ④ **Tlačidlo smeru rotácie motora:** Nastavenie smeru rotácie motora.

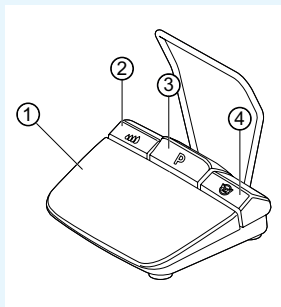

## Pripojenie sady hadíc

1. Zatvorte hadicovú svorku ⑦.
2. Pripevnite hadicu chladiaceho média ① k držiaku alebo ohybu.
3. Pripevnite natesno spony ② k vedeniu motora.
4. Nechajte zapadnúť hadicový adaptér ③.
5. Vložte hadicu do čerpadla (odstup cca. 1 cm medzi konektorom a prívodom do čerpadla ④ a čerpadlom).
6. Zasuňte napichovaciu ihlu ⑥.
7. Otvorte hadicovú svorku ⑦.

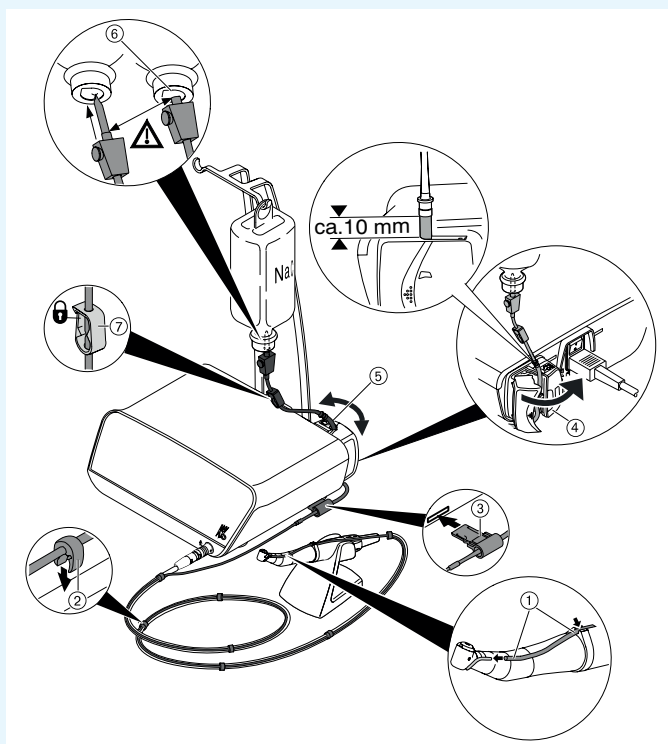

### Upozornenie


Zavzdušňovací otvor na napichovacej ihle ⑥ otvorte iba v prípade sklenených fliaš.



### POZOR

Tento stručný návod na obsluhu obsahuje iba najdôležitejšie funkcie obsluhy. Pred prvým uvedením do prevádzky ako aj počas obsluhy osobami, ktoré nie sú oboznámené so zaobchádzaním s týmto medicínskym produktom, je treba bezpodmienečne dodržiavať pokyny uvedené v dodanom návode na použitie.



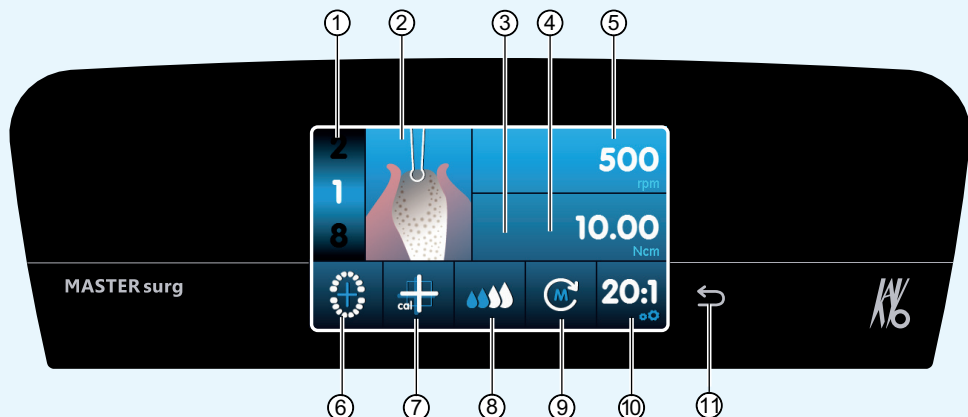

- |  |   |
|--|---|
| ① Programový krok (1 až max. 10)   | ⑦ Aktivácia jednotykovej kalibrácie               |
| ② Zobrazenie činnosti  | ⑧ Nastavenie množstva čerpaného chladiaceho média |
| ③ Maximálny existujúci točivý moment (nezobrazuje sa pri všetkých činnostiach) | ⑨ Smer otáčania motora                            |
| ④ Obmedzenie točivého momentu  | ⑩ Prevod  |
| ⑤ Otáčky   | ⑪ Tlačidlo Späť                                   |
| ⑥ Zobrazenie stavu diaľkového pedálového spúšťača / zadanie polohy implantátu  |   |

## Zmena parametrov a činnosti

### Voľba nastavení prístroja

Ak chcete prejsť do chirurgického programu alebo na voľbu programov, krátko stlačte tlačidlo Späť ⑪.

V prípade dlhého stlačenia vyvoláte informácie o nastavení prístroja.

### Voľba príp. zmena parametra alebo činnosti

Funkcie ④ a ⑤: Zmena je možná posunutím regulátora doprava alebo doľava alebo kliknutím na symboly +/-.

Funkcie ①, ⑧, ⑨ a ⑩: Možné zmeniť priamo kliknutím.

Funkcie ②, ⑥ a ⑦: Možné zmeniť v zobrazenom dialógovom okne.

Uloženie je automatické pri opustení parametra alebo aktivity.

### Obmedzenie počtu programových krokov

Po poslednej zvolenej činnosti kliknite na programový krok a zvolte symbol vlajky.

### Zrušenie obmedzenia programových krokov

Zvoľte programový krok so symbolom vlajky a priradte novú činnosť.

### Zobrazenie krútiaceho momentu a dokumentácia

Krútiaci moment sa graficky zobrazuje v rámci činnosti „Uloženie implantátu“ a ukladá sa na SD kartu iba vtedy, ak je zapnutá dokumentačná funkcia.

