



Rövid kezelési utasítás

- ① **Fordulatszám gomb:** Motor indítása / fordulatszám növelése.
- ② **Hűtőközeg gomb:** A Hűtőközeg gomb esetében 2 üzemmód állítható be.
A beállított üzemmódtól függően a Hűtőközeg gomb a következők funkciókkal rendelkezik:
Röviden megnyomva - Szállított hűtőközeg mennyiség be-/kikapcsolása vagy Röviden megnyomva - Szállított hűtőközeg mennyiség beállítása 0 és 110 ml/s között (4 fokozat).
Hosszan megnyomva - Kézi öblítő funkció aktiválása.
- ③ **Program gomb:** Röviden megnyomva - Programlépés előre.
Hosszan megnyomva - Programlépés hátra.
- ④ **Motor forgásirány gomb:** A motor forgásirányának beállítása.

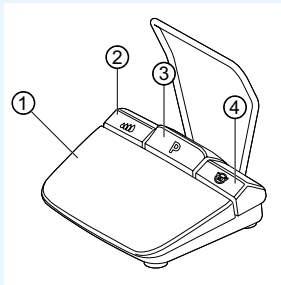

Tömlőkészlet csatlakoztatása

1. Zárja össze a tömlőszorítót ⑦.
2. Rögzítse a hűtőanyag-tömlőt ① a kézi- vagy könyökdarabra.
3. Rögzítse szorosan a csipeszket ② a motorvezetékhez.
4. Pattintsa be a tömlőadaptert ④.
5. Helyezze a tömlőt a szivattyúba (kb. 1 cm távolság a konnektor és a szivattyúbeemenet ④ között), majd reteszelje a szivattyút.
6. Szűrje be a szűrőtűt ⑥.
7. Nyissa ki a tömlőszorítót ⑦.

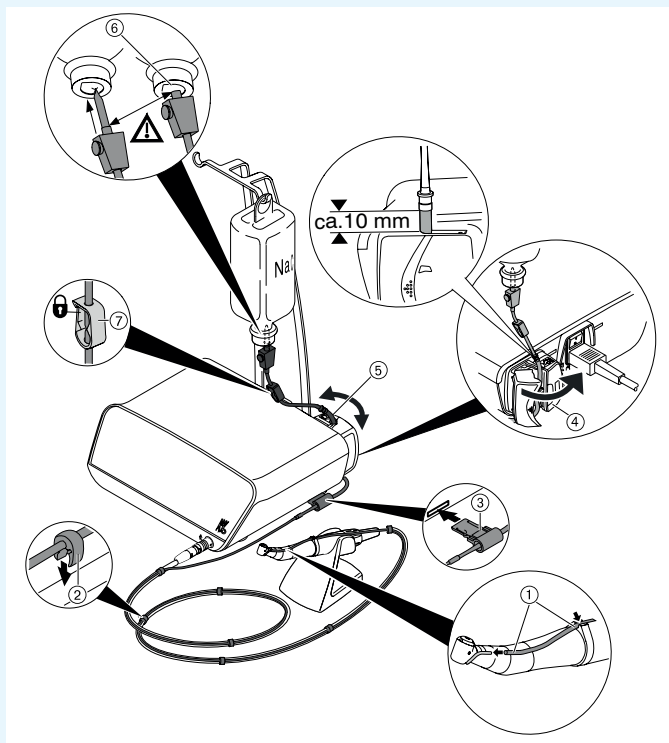

Megjegyzés


Kizárólag üvegpalackok esetén nyissa meg a szellőztetőt a szűrőtűn ⑥.



VIGYÁZAT

Jelen rövid kezelési utasítás kizárólag a lényeges kezelési funkciókat tartalmazza. Az első üzembe helyezés előtt, valamint az olyan személyek által végzett kezelés során, akik nem rendelkeznek kellő szaktudással az orvostechnikai eszköz kezelését illetően, feltétlenül figyelembe kell venni a szállítási terjedelemben tartozó használati utasítást.



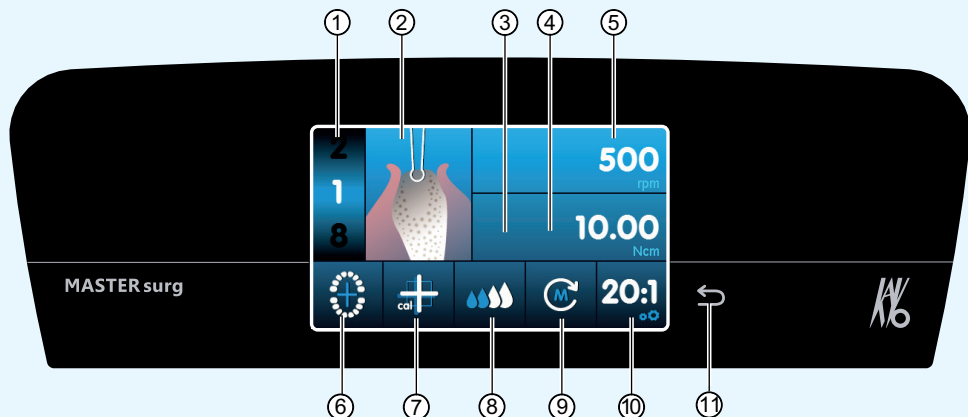

- | | |
|---|---|
| ① Programlépés (1-től max. 10-ig) | ⑦ One-Touch kalibrálás aktiválása |
| ② Aktivitás megjelenítése | ⑧ Szállított hűtőanyag mennyiség beállítása |
| ③ Fellépett maximális nyomatok
(nem minden aktivitás esetében jelenik meg) | ⑨ Motor forgásirány |
| ④ Nyomatékkorlátozás | ⑩ Áttétel |
| ⑤ Fordulatszám | ⑪ Vissza gomb |
| ⑥ Rádiófrekvenciás lábpedál / Implantátum
helyzetének megadása állapotjelzés | |

Paraméter és aktivitás módosítása

Eszközbeállítás kiválasztása

A sebészeti programba vagy a programválasztásba történő visszajutáshoz, nyomja meg röviden a Vissza gombot ⑪.

Nyomja meg hosszan, hogy behívja az eszközbeállításokat.

Paraméter vagy tevékenység kiválasztása, ill. módosítása

④ és ⑤ funkciók: A szabályozó jobbra vagy balra tolásával, vagy a +/- szimbólumok megérintésével módosítható.

①, ⑧, ⑨ és ⑩ funkciók: Érintéssel közvetlenül módosíthatók.

②, ⑥ és ⑦ funkciók: A megjelenő párbeszédablakon belül módosíthatók.

A paraméter vagy az aktivitás elhagyása után a mentés automatikusan megtörténik.

Programlépések számának korlátozása

Érintse meg az utolsó, kiválasztott aktivitás utáni programlépést, majd válassza ki a zászló szimbólumot.

A programlépések korlátozásának feloldása

Válassza ki a zászló szimbólummal ellátott programlépést, majd rendeljen hozzá egy új műveletet.

Nyomatékjelző és dokumentálás

A forgatónyomaték csak az „Implantátum behelyezése” tevékenységben jelenik meg grafikus formában és tárolódik el az SD-kártyára.

