



简版使用说明书

- ① 转速按键：启动马达 / 增加转速。
- ② 冷却剂按键：针对冷却剂按键，可以设置两种 运行模式。视设置的运行模式而定，冷却剂按键具备下列功能：
短按 - 开/关冷却剂输送量或者
短按 - 调节冷却剂输送量，调节范围：0 至 110 ml/s（4 挡）。
长按 - 激活手动冲洗功能
- ③ 程序按键：短按 - 下一程序步骤
长按 - 上一程序步骤
- ④ 马达转动方向按键：设置马达转动方向。

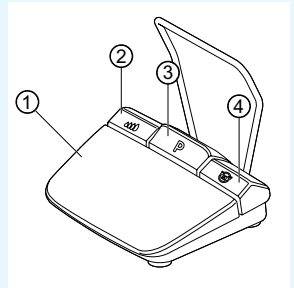

连接软管套件

1. 闭合软管卡箍 ⑦。
2. 将冷却剂软管 ① 固定在手机和弯机头上。
3. 将卡夹 ② 紧紧固定在马达管路上。
4. 卡扣软管适配器 ③。
5. 将软管放入泵中（连接器和泵输入端 ④ 的间距约为 1 cm，将泵联锁）。
6. 插入插针 ⑥。
7. 打开软管卡箍 ⑦。

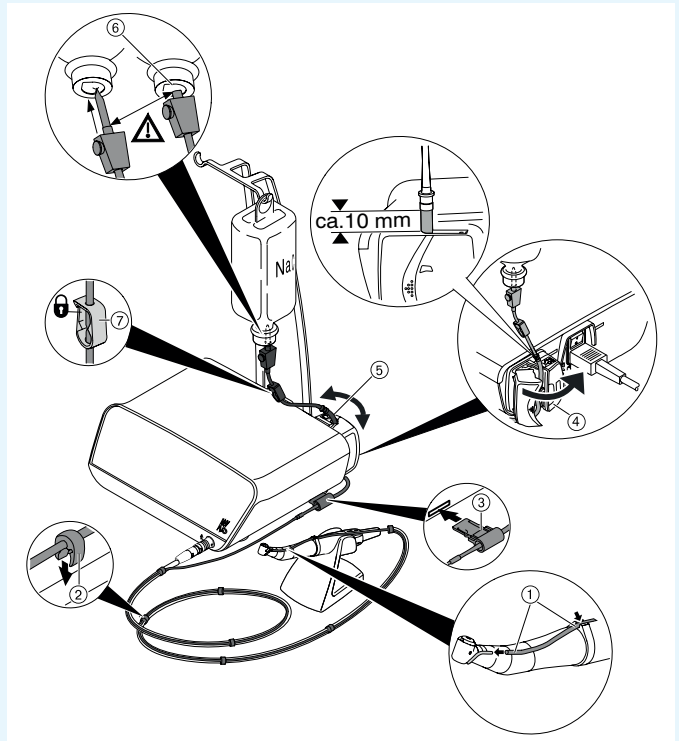

提示


仅在使用玻璃瓶时打开插针 ⑥ 上的排气装置。



小心

本简版使用说明书仅包含重要操作功能。首次调试之前，以及不熟悉本医疗产品的人员操作设备时，务必遵守供货范围内提供的使用说明书。



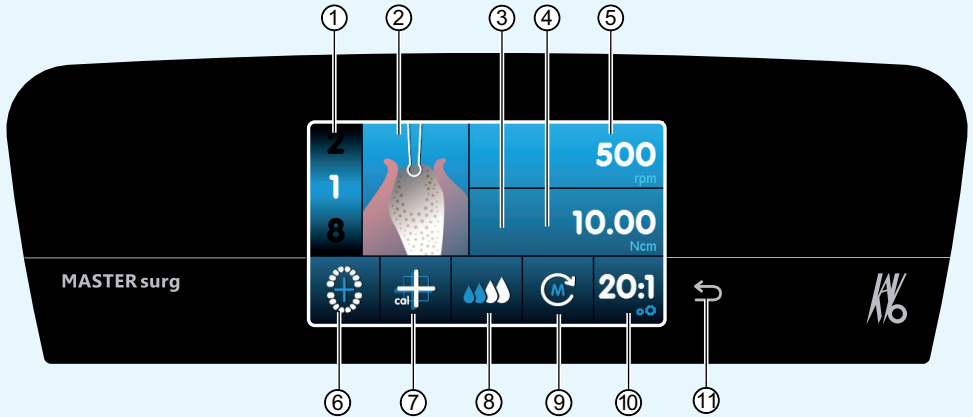

- ① 程序步骤 (1 至 10 (最大))
- ② 动作显示
- ③ 出现的最大扭矩
(仅针对部分动作显示)
- ④ 扭矩限制
- ⑤ 转速
- ⑥ 无线脚踏起动器状态显示界面 / 输入种植体位置
- ⑦ 激活 One Touch 校准模式
- ⑧ 调整冷却剂量
- ⑨ 马达旋转方向
- ⑩ 传动比
- ⑪ 返回键

更改参数和动作

选择设备设置

短按返回键 ⑪，可以进入外科程序或者程序选择界面。
长按调用设备设置。



选择和更改参数或动作

功能 ④ 和 ⑤：可以通过左右推动控制器进行更改，或者点击 +/- 符号更改。

功能 ①、③、⑨ 和 ⑩：直接点击更改。

功能 ②、⑥ 和 ⑦：可以在显示的窗口中更改。


离开参数或动作时自动保存。

限制程序步骤数

选完最后一个动作之后，点击程序步骤并选择旗帜符号。

取消限制程序步骤

选择带旗帜符号的程序步骤并分配新动作。

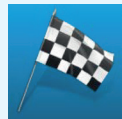

扭矩显示和存档

只有接通存档功能后才会“放置种植体”动作下通过图片形式显示扭矩并保存在 SD 卡上。

