



Instruções breves de utilização

- ① **Tecla de velocidade de rotação:** Iniciar motor/ aumentar velocidade de rotação.
- ② **Tecla do agente de refrigeração:** Para a tecla do agente de refrigeração podem ser configurados 2 modos de funcionamento. Dependendo do modo de funcionamento configurado a tecla do agente de refrigeração tem as seguintes funções: Premir brevemente - Ligar/desligar caudal do agente de refrigeração ou premir brevemente - Configurar caudal do agente de refrigeração de 0 até 10 ml/s (4 níveis).
Premir prolongadamente - ativar função de enxaguamento manual.
- ③ **Tecla de programação:** Premir brevemente - Passo do programa para a frente. Premir prolongadamente - Passo do programa para trás.
- ④ **Tecla de sentido de rotação do motor:** Definir sentido de rotação do motor.

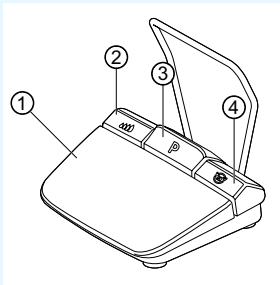

Ligar conjunto de mangueiras

1. Fechar a abraçadeira da mangueira ⑦.
2. Fixar a mangueira do agente de refrigeração ① na peça de mão ou no contra-ângulo.
3. Fixar os cliques ② junto do cabo do motor.
4. Encaixar adaptador de mangueira ③.
5. Colocar a mangueira na bomba (aprox. 1 cm de distância entre o conector e a entrada da bomba ④ e bloquear a bomba).
6. Inserir a agulha de punção ⑥.
7. Abrir a abraçadeira da mangueira ⑦.

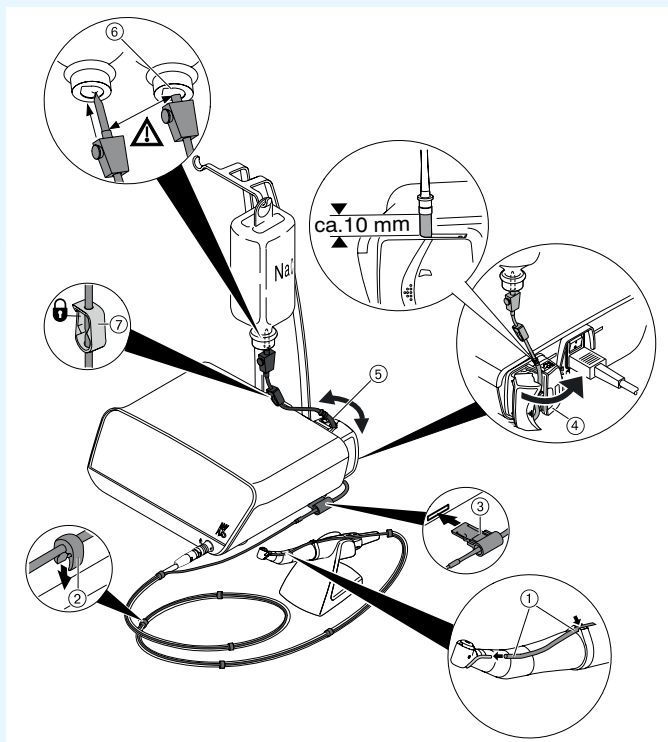

Indicação


Abrir a ventilação na agulha de punção ⑥ apenas em botijas de gás.



CUIDADO

Estas instruções breves de utilização contêm apenas as funções básicas de comando. Antes da primeira colocação em funcionamento e manuseamento por pessoas que não estão familiarizadas com este produto médico, ter impreterivelmente em atenção as instruções de utilização.



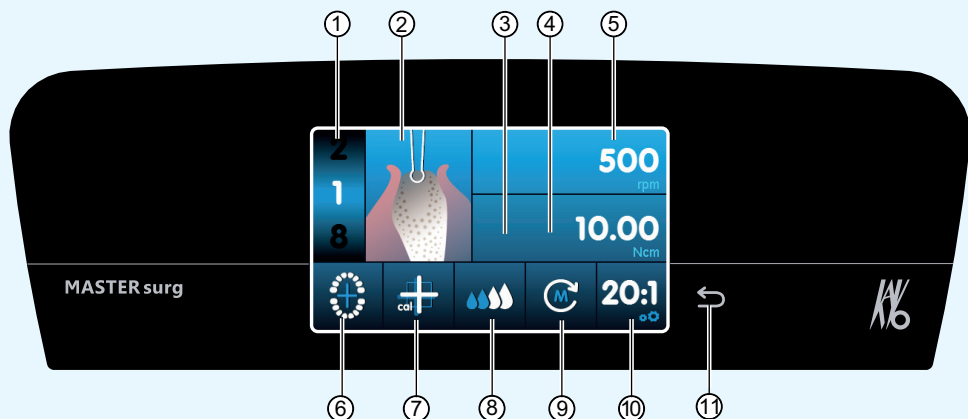

- | | |
|--|--|
| ① Passo de programa (1 até ao máx. 10) | ⑦ Activação da calibragem One-Touch |
| ② Representação da actividade | ⑧ Ajuste da quantidade de agente de refrigeração a transportar |
| ③ Binário máximo emergente (não é exibido em todas as actividades) | ⑨ Sentido de rotação do motor |
| ④ Limitação do binário | ⑩ Transmissão |
| ⑤ Velocidade de rotação | ⑪ Tecla voltar |
| ⑥ Indicação do estado do pedal controlado por rádio-frequência / Posição do implante | |

Alterar o parâmetro e a actividade

Seleccionar a configuração do aparelho

Premir brevemente a tecla voltar ⑪ para aceder ao programa de cirurgia ou à selecção de programas.

Premir prolongadamente para aceder às configurações do aparelho.

Seleccionar ou alterar parâmetros ou actividades

Funções ④ e ⑤: podem ser alteradas deslocando o regulador para a direita ou para a esquerda, ou clicando nos símbolos +/-.

Funções ①, ⑧, ⑨ e ⑩: podem ser alteradas directamente por clique.

Funções ②, ⑥ e ⑦: podem ser alteradas dentro da janela de diálogo que aparece.

A gravação ocorre automaticamente ao abandonar o parâmetro ou a actividade.

Limitar o número de passos do programa

Clicar no passo de programa após a última actividade seleccionada e seleccionar o símbolo da bandeira.

Cancelar a limitação dos passos do programa

Seleccionar o passo de programa com o símbolo da bandeira e atribuir uma nova actividade.

Indicação do binário e documentação

O binário é indicado como gráfico na actividade „Colocar implante” e memorizado no cartão SD apenas se a função de documentação estiver ligada.

